

# APÓSITOS HIDROGEL CALLOS, AMPOLLAS



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Tiritas para ampollas** está fabricado con una fina película adhesiva hidrocoidala laminada, con una capa de poliuretano impermeable, antivírica y antibacteriana.

Tras la aplicación de la tirita, ésta actúa como una nueva piel, amortiguando y evitando la fricción, lo que ayuda a aliviar el dolor. También absorbe las secreciones en el caso de que se rompa la ampolla, convirtiéndolas en un gel que genera un ambiente hidratado idóneo para la cicatrización, permitiendo que la herida cicatrice más rápido.

En el caso de durezas, la tirita amortigua y alivia la presión sobre el área afectada.

## INDICACIONES

Favorece la cicatrización rápida de ampollas y durezas y ofrece lo siguiente:

- Amortigua y evita el roce de las ampollas intactas.
- Absorción del líquido de la ampolla si ésta se rompe.
- Ambiente hidratado para la cicatrización de la herida.
- Reblandecimiento para retirar las durezas con mayor facilidad.
- Protege de las infecciones y la suciedad, gracias a la capa externa de poliuretano que actúa como barrera antibacteriana y antivírica.

## MODO DE EMPLEO

- Adhesión garantizada durante varios días.
- Para no alterar el proceso de cicatrización y mientras no se aprecien signos de infección, se deberá dejar la tirita en su sitio durante varios días y solo se deberá cambiar cuando se desprenda por sí solo.

## PRESENTACIÓN

- 1 sobre de celulosa conteniendo una tirita.
- Está disponible en distintas formas y tamaños para los dedos, el talón y la planta del pie.

## CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

- No usar en heridas infectadas.
- Si hay infección, interrumpa su uso.

## CATEGORÍA DEL PRODUCTO

Producto Sanitario clase I